


信安  
智囊

S-AIRBAG

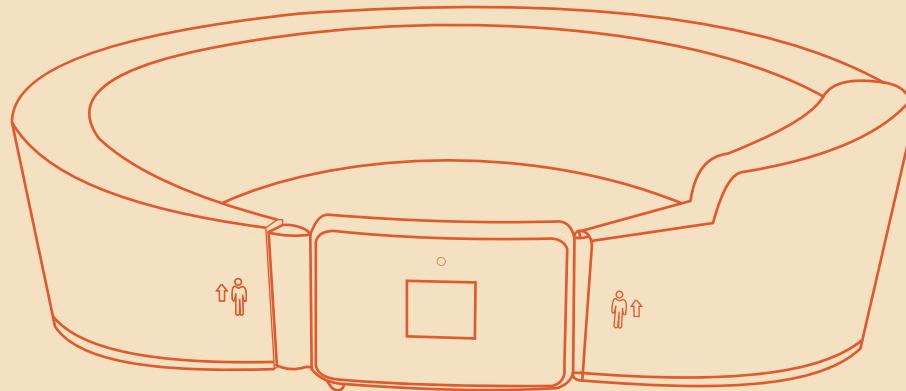


# 智能气囊防护腰带说明书



人体防护专家！



终于等到你，  
感谢你选择我们！

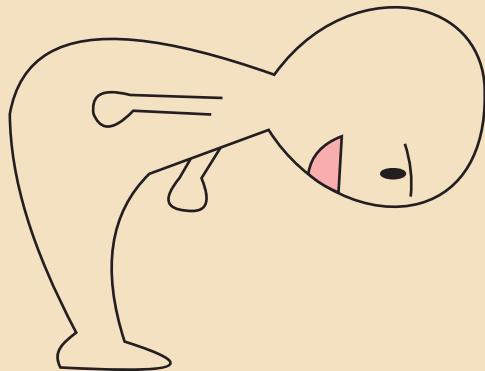

第一次拿到产品  
是不是好激动哩？

这页字很多但很重要，  
认真看看先咯。



# 免责声明


尊敬的用户，请您使用本产品前详细了解产品的功能，使产品能正常为您提供防护。

- 一、本设备正确佩戴后，可正常工作并有工作信号指示；使用过程中如出现故障警示请立即暂停使用并咨询厂家售后客服，按照指导排除故障后再使用，如无法解决请寄回厂家维修。
- 二、本产品并非全身性保护设备，在身体摔倒时的保护区域有指向性（局限性），主要保护部位为髋部骨骼。
- 三、本产品主要作用是减小髋部骨骼在落地时受到的冲击力和损伤，但因每个使用者身体状态不同，因此不能保证完全不受伤。
- 四、本产品的气囊保护触发是基于佩戴者在正常站立姿态或行走状态下的后向或侧向跌倒情况，其余情况：例如跌倒时拉住扶手缓慢落地或者坐姿/蹲姿状态下的跌倒，因速度较慢有可能不会触发保护。向正前方的跌倒时，不会触发保护。
- 五、骨质疏松重症患者，即使轻微碰撞也有可能发生骨折，建议立即就医改善病情，避免受伤风险。
- 六、请做好非产品佩戴时段的保护措施（包括但不限于浴室防滑，夜间起夜保护）。
- 七、当您在使用/乘坐机动车、飞机等交通工具时，不建议穿戴本产品，如穿着紧身类衣物时，请将本产品佩戴至衣物最外层。
- 八、当您在进行跑步、舞蹈等较为剧烈的运动时，因本产品内置传感器可能会认为您即将跌落从而触发安全气囊弹出，上述情况请勿使用本产品。另外不建议有植入心脏起搏器等植入性电子医疗设备人群使用本产品。
- 九、小朋友和正常的成年人，不建议使用本产品。

使用本产品期间，所造成的伤害及一切经济损失，与设备质量及设备供应方无关。

是不是字太多有点上头?  
来点图随便看看



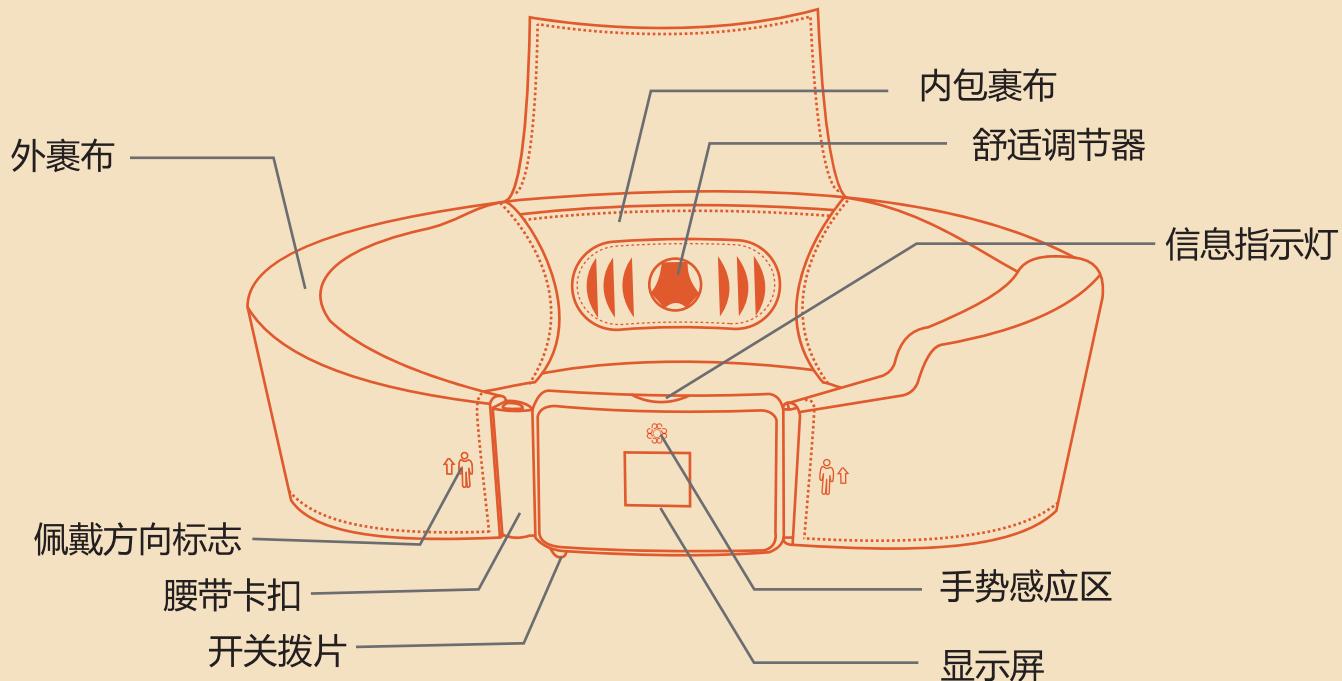

产品名称：智能防护气囊腰带

充电电压：5v

充电电流：2A

产品型号：S10

电池容量：6000mAh

产品尺码：S/M/L/XL/XXL

图太复杂了看不懂?  
别慌拿起腰带跟着我来调节




紧

将舒适调节器顺时针旋转



舒适调节器

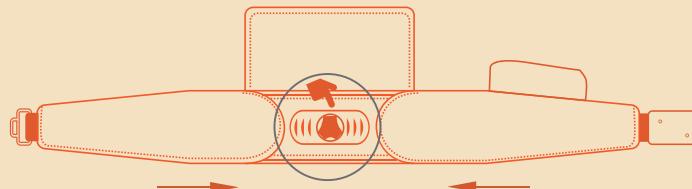

松


将舒适调节器提起，腰带向两边拉直，调节至合适长度，按下按钮



提起




拉直

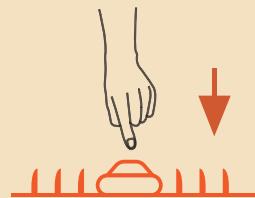


按下

拿起来就这么轻轻一扣合，  
听到滴滴响就对了。



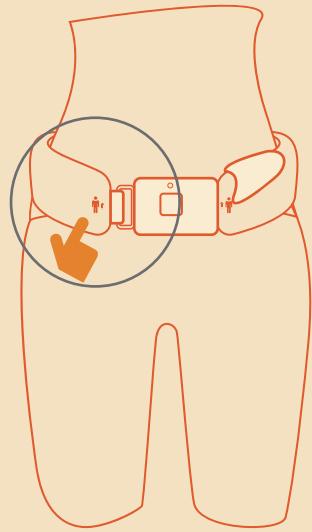

佩戴标识向上

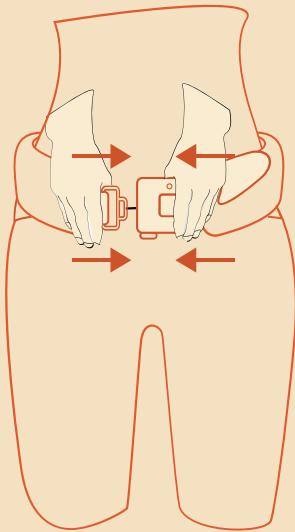

调整合适长度后直接扣合



咦？屏幕怎么亮了？

后面你简单看看，反正就是很厉害。





设备启动显示



穿戴提醒显示



设备欢迎语显示



设备时间显示



设备低电量提醒



设备充电显示



未检测到穿戴，请调整气囊腰带与身体的贴合度，贴近身体。



检测到设备故障，请联系厂家或客服解决




设备摔倒气囊打开后，会显示SOS警报模式，关联APP也会收到相应的警报



哦吼？怎么又有一个灯亮了？  
别急，细细听我道来。



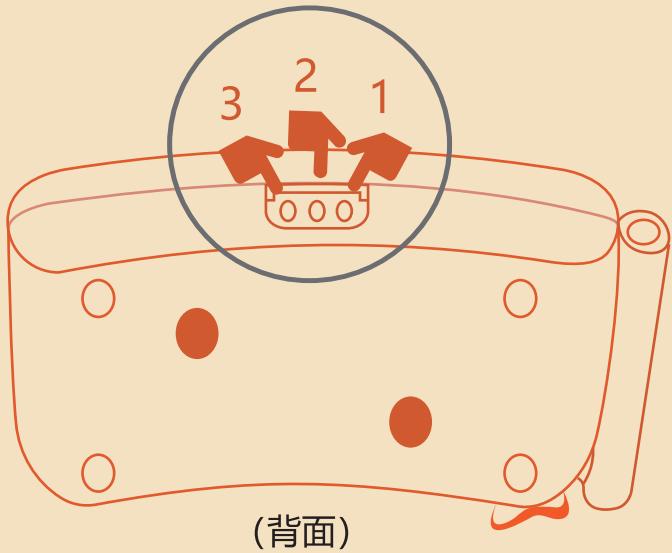

### 1. 穿戴指示灯(红色灯)




检测穿戴



正常

红灯闪烁表示正在检测穿戴情况，正常后，熄灭

### 2. 故障指示灯(红色灯)

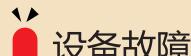


设备故障，不能穿戴



正常

红灯常亮表示设备故障，不能穿戴

### 3. 红灯常亮代表睡眠状态，红灯闪烁需充电

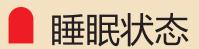

睡眠状态



红灯闪烁，设备需要充电

屏幕熄灭了？

不要急，跟着我一起挥挥手。



佩戴腰带后，系统会进入检测流程


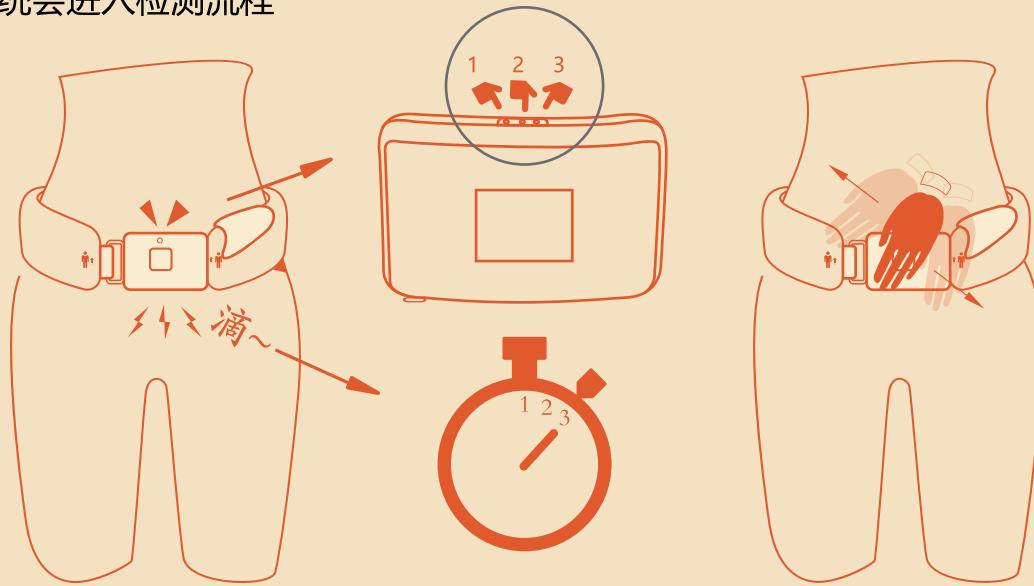




图2 唤醒屏幕

1. 未检测到穿戴，设备会持续蜂鸣提醒（滴~滴~滴），同时1号灯闪烁
2. 检测到设备有穿戴时，蜂鸣器长鸣（滴——）3秒，同时1号灯常亮
3. 穿戴成功后，指示灯熄灭，蜂鸣停止，10s后屏幕会进入待机页面
4. 在屏幕3-5cm处,上下晃动手掌即可唤醒屏幕（图2）

再跟着我左手右手一个慢动作，  
轻轻一按就解开腰带啦。

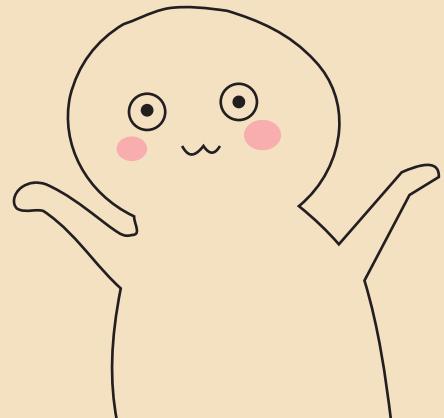

将底部拨片向左前方拨动，轻轻拔出卡扣即可

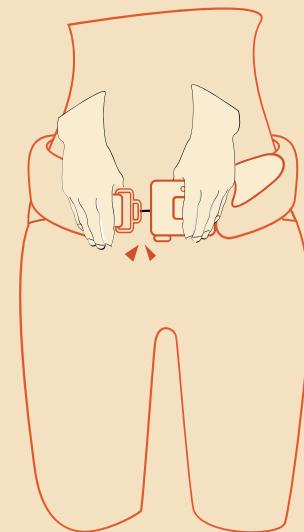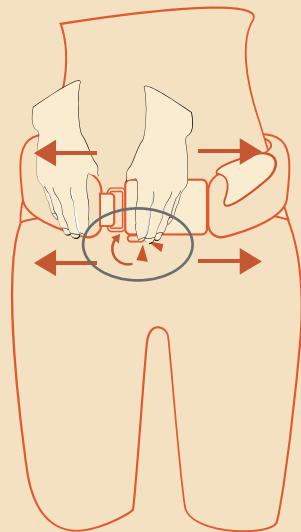

没电了咋整？

看看盒子里拿出线充电呗。




设备低电量后需要及时充电，可通过磁吸口充电



磁吸式触点充电口



磁吸式触点电源线

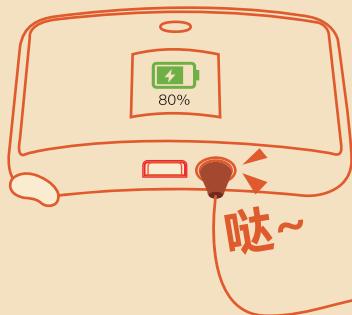

电源线充电头



哎呀，忘记叫你下载APP咯，  
没错我就是故意让你戴上试试，  
然后解开再绑定设备的。



使用微信扫描二维码或者登录手机应用市场下载“信安智囊”APP，注册成功之后，如图按顺序点击【我】--【关联设备】--【扫码】，扫码添加成功后，即可实时关联设备。



扫描二维码，  
访问页面找到  
对应的iOS、  
安卓安装包  
进行下载！



绑定之后有啥用?  
看后面你就知道咯。





## 卫星定位 实时卫星定位



## 行走轨迹 定位到当前设备所在位置



## 设备信号 显示设备信号情况



## 设备电量 显示设备电池电量情况



## SOS SOS警报

设备触发报警后，关联APP会接收到设备发出的警报，包括警报位置，关联家属可以立即联系或采取救援措施（此功能需在手机端设置允许本程序后台运行）




## 故障报警

设备故障后，标志成红色显示，并弹出故障提示页面，点击关闭后，可点击故障按钮再次弹出页面

你以为就这点用处？

别急，继续看。

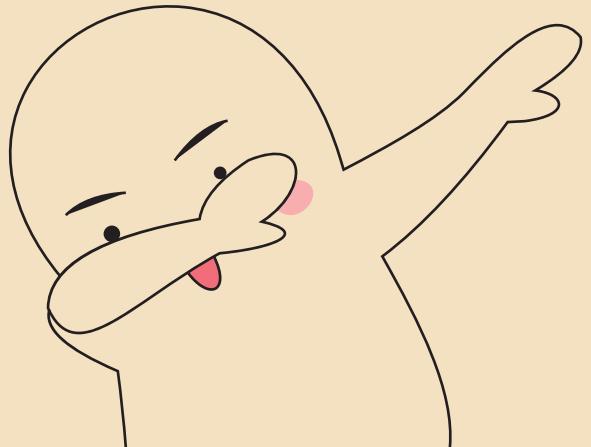




## 步数&轨迹

点击【运动】，可查看当日步数记录；  
点击【周/月】可切换时长，可查看7日  
内的轨迹记录；  
点击【运动】--【轨迹】可查看轨迹记录。

## SOS警报

设备佩戴者跌倒触发保护，气囊弹出后，  
设备屏幕显示SOS标志，蜂鸣器长鸣。  
同时绑定设备的手机用户APP弹出提示页面，  
如图，显示故障地址及导航！  
如确定情况无碍点击关闭后，  
可点击SOS按钮再次显示。

我跟你说，  
其他都可以不看，  
这页必须认真看！

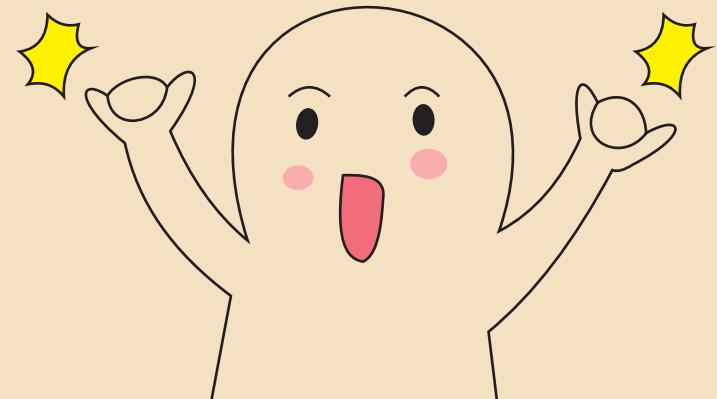

设备触发保护状态后：


1. 气囊展开同时保护人体，
2. 设备屏幕显示为SOS状态，并伴有蜂鸣提示声音。
3. 同时APP向关联用户发送警报信息。



设备屏幕显示状态



手机APP显示内容

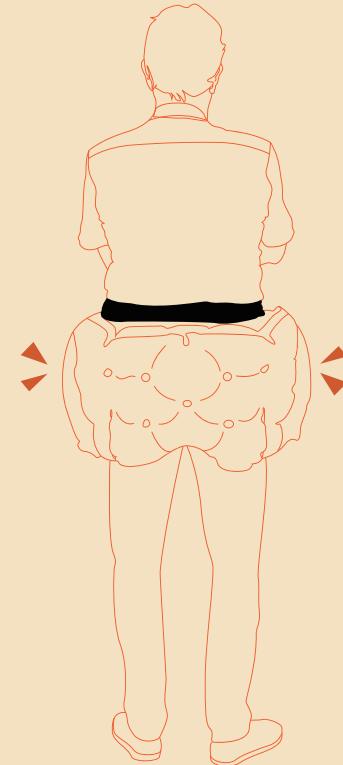

气囊展开状态

是不是看完了特安心?  
别得意，注意事项来啦。





货物开箱时如发现损坏如凹陷、变形、污渍、破裂等禁止使用，并及时联系服务中心




请勿拆卸产品内部结构；设备发生故障或气囊打开请联系售后服务，请勿擅自维修设备；



请充电或者不使用时避免置于儿童能触及的地方；请勿投掷或者摔打本产品；



请勿靠近火源或其他热源及尖锐物品；请勿携带此产品搭乘飞机或空中运输

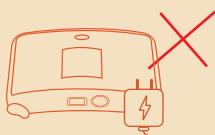

请使用本公司的电源适配器，请勿连接不兼容的适配器；



洗澡或休息时请勿佩戴



本产品包含电池，请单独放置，如长期不使用，再次使用时请先充电

嘘， 还有问题你要偷偷问我？  
哦， 坏了怎么办你看后面。



## **更换耗材**

- 1、设备触发保护气囊打开后，需要返厂更换气瓶等耗材方可再次使用；因压缩气瓶为设备专用配套部件，同时气囊需要按照标准方法进行折叠和检测后才能在触发保护时正常展开，故请用户切勿自行更换气瓶或折叠气囊并重新使用；
- 2、可通过APP、网站或电话联系我司，支付相应耗材更换费用，告知我司收件地址，同时将设备妥善打包（建议保留原包装）后寄回售后中心，寄出前请观察囊袋是否出现磨损或破损；
- 3、我司售后中心收到设备后，在3个工作日内更换耗材并检测合格后寄回；
- 4、自行寄件的用户，请使用我司指定快递公司——顺丰速运上门收件/寄件，往返快递费用由我司承担；
- 5、在更换耗材期间，请做好防跌倒保护措施。

## **故障维修**

- 1、通过APP、官方网站或电话联系我司，排除使用不当等人为原因后，将设备连同包装寄回我司售后中心
- 2、设备无法通电或者显示故障信息，须寄回我司售后中心进行维修
- 3、保修期内产品邮寄费用由本公司承担，请联系顺丰快递上门收件，费用到付。
- 4、售后地址：广东省广州市番禺区桥兴大道491号2号楼B-408
- 5、售后电话：020-3660 0001

全部看完了还是不太明白，  
别慌，有空打电话咋们聊聊。



更多详细的使用说明请登录

[www.s-airbag.com](http://www.s-airbag.com)

网站也看不明白你就给我打电话


020-36600001

要在周一到周五9: 00-18: 00打给我哟!

不是我不爱你，而是我的肚子寂寞了，

我的床也需要我，答应我等我回来!

再次感谢你选择我们，  
请持续关注我们，  
我们会研发更多好产品给大家。

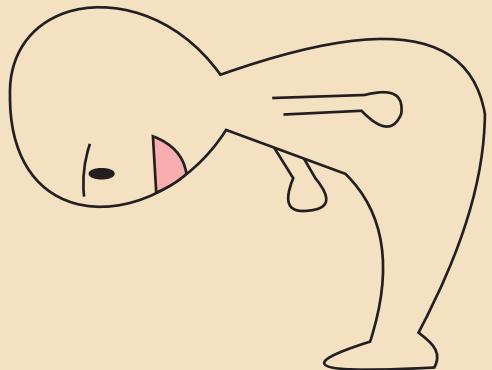



广州市信安智囊科技有限公司