


智能气囊服使用说明书

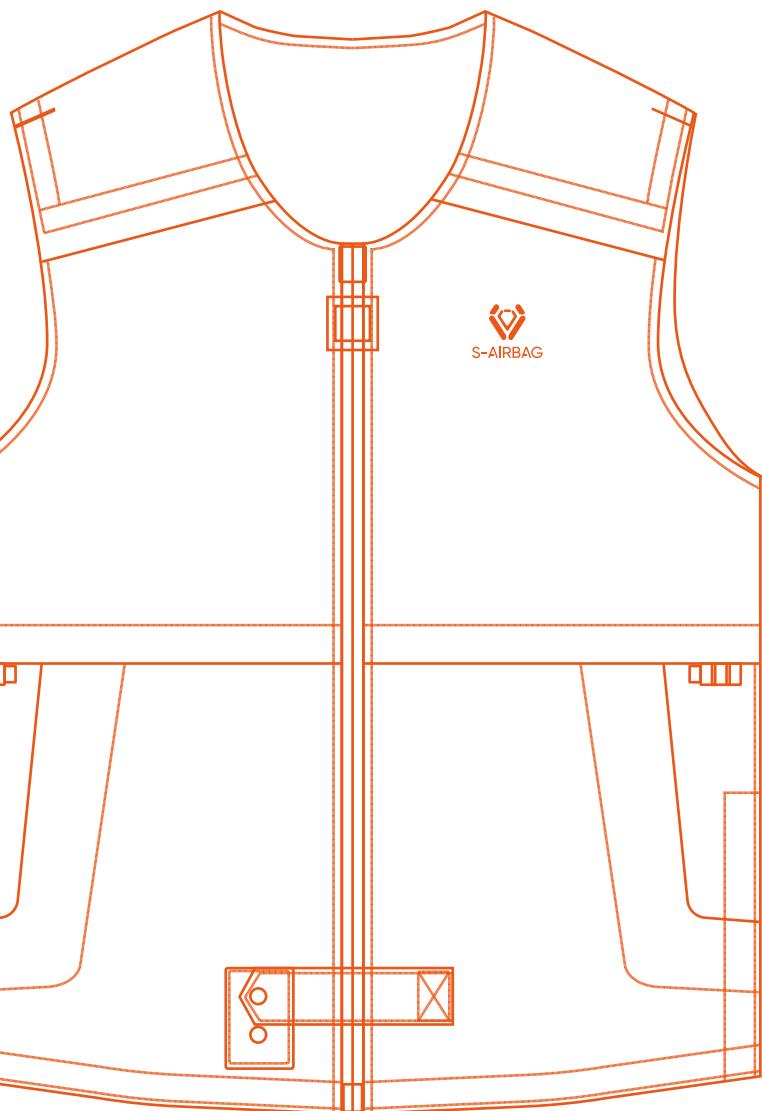


信安智囊
人体防护专家

HUMAN PROTECTION EXPERT



S-AIRBAG
信安智囊

S20智能气囊服基础信息

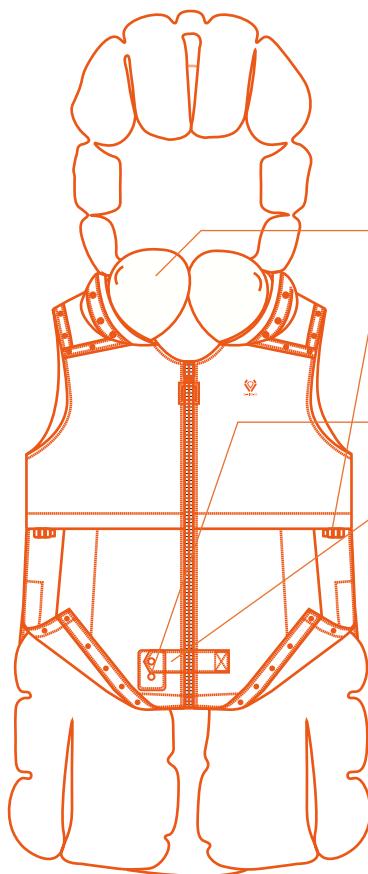

一体式安全气囊
舒适调节绳
军用级气瓶
智能指示器 & 充电口
开关按钮
高精度传感器

产品名称: 智能气囊服

产品型号: S20

输出: 5V=2.1A

输入: 110-240V~50/60Hz0.3A Max

电池容量: 5000mAh




S32使用指导视频



S20使用指导视频



蓝牙连接教程视频

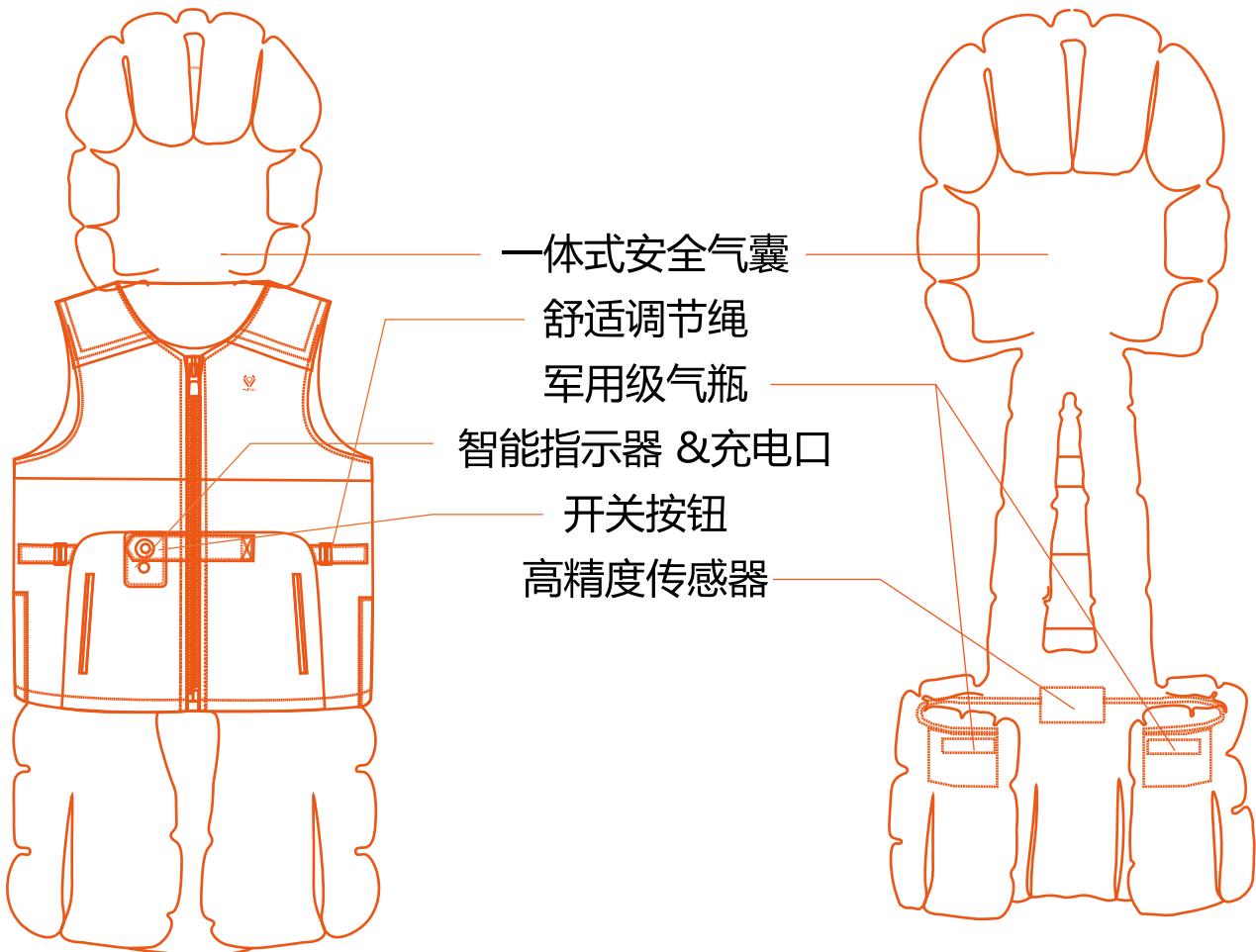


产品名称: 智能气囊服

产品型号: S32

输出: 5V=2.1A


输入: 110-240V~50/60Hz0.3A Max

电池容量: 5000mAh

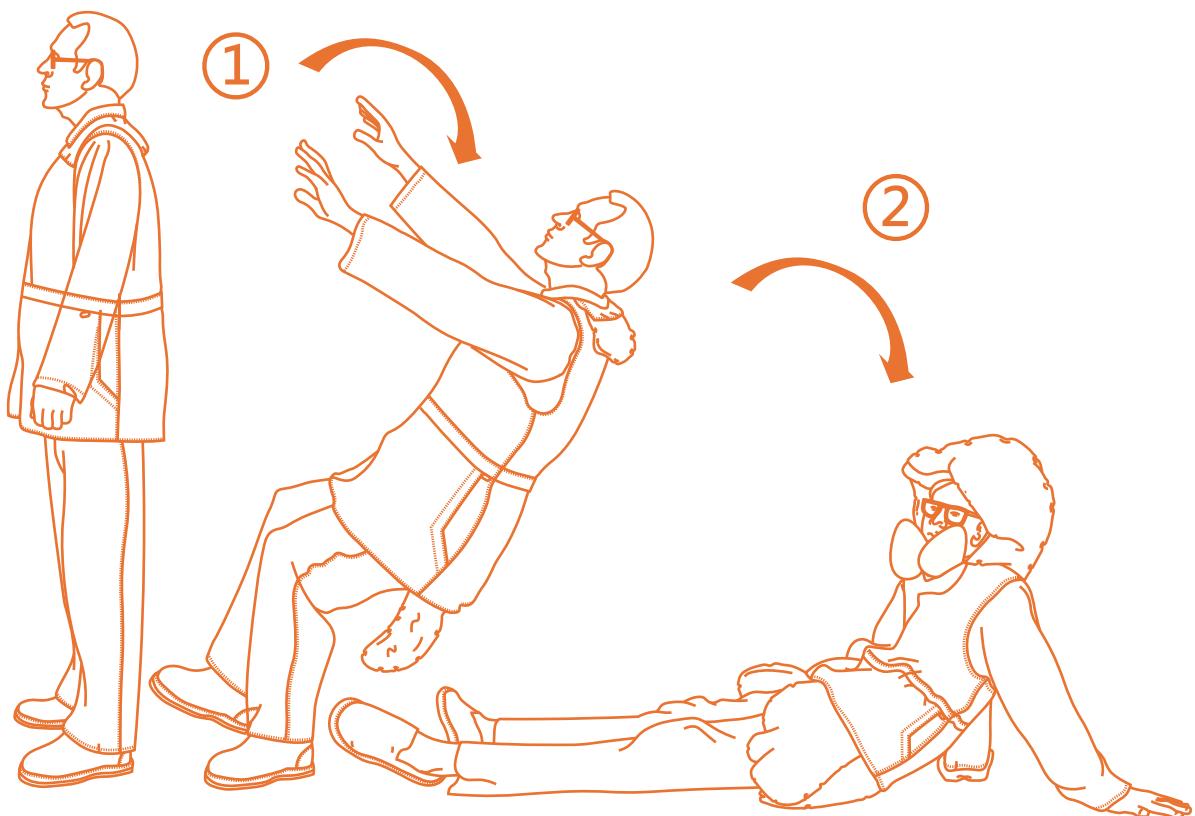

- ① 智能算法识别人体姿态的变化并做出触发气囊指令
- ② 保护相应部位

该设备的传感器采集人体活动数据，经过上万次人体模拟测试的智能算法，在判断人体即将跌倒时发出指令。气体发生器会在0.08秒内将压缩气瓶内的气体迅速充气到气囊内，达到保护作用。

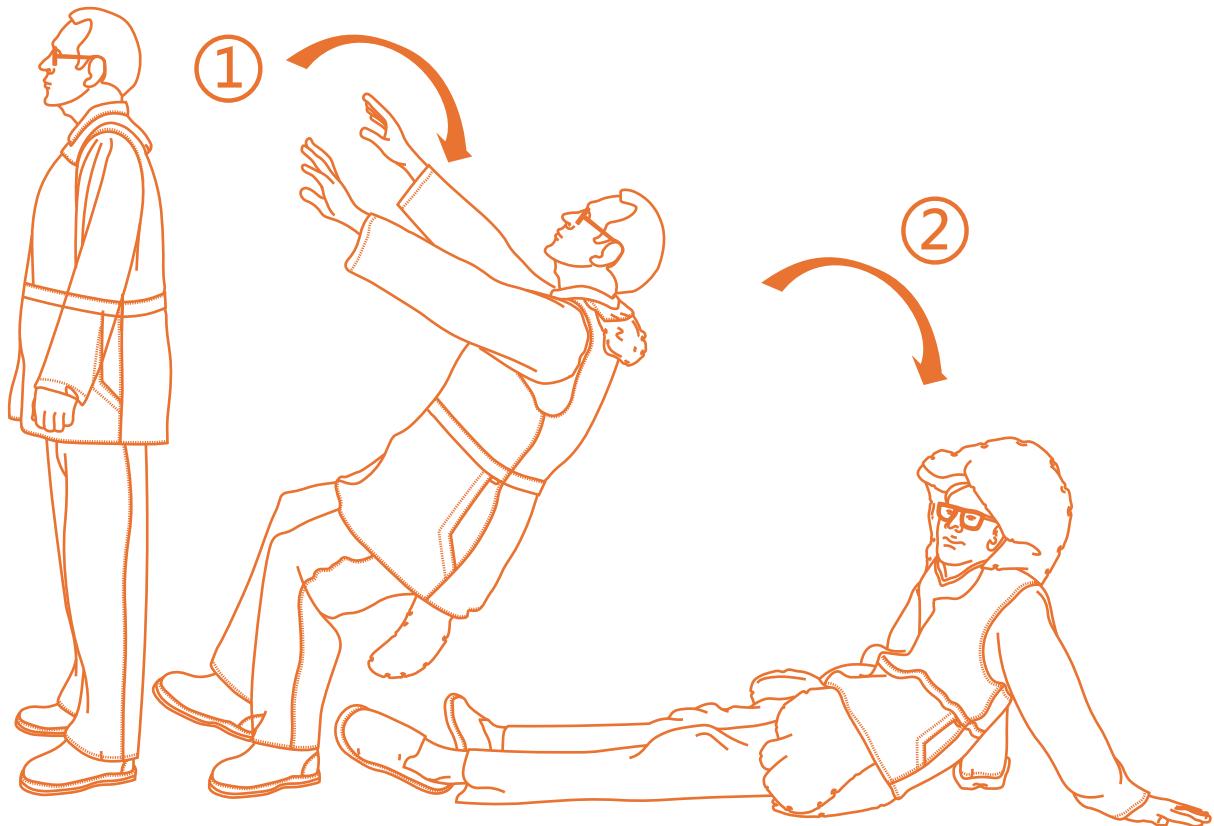


①智能算法识别人体姿态的变化并做出触发气囊指令

②保护相应部位

该设备的传感器采集人体活动数据，经过数万次人体模拟测试的智能算法，在判断人体即将失去平衡时发出指令，压缩气体会在0.08秒内将安全气囊快速充气以达到缓冲效果。

包装细节

包装内包含：智能气囊服、用户指南、USB 电源适配器和 USB 磁力充电线、保修卡、产品合格证。

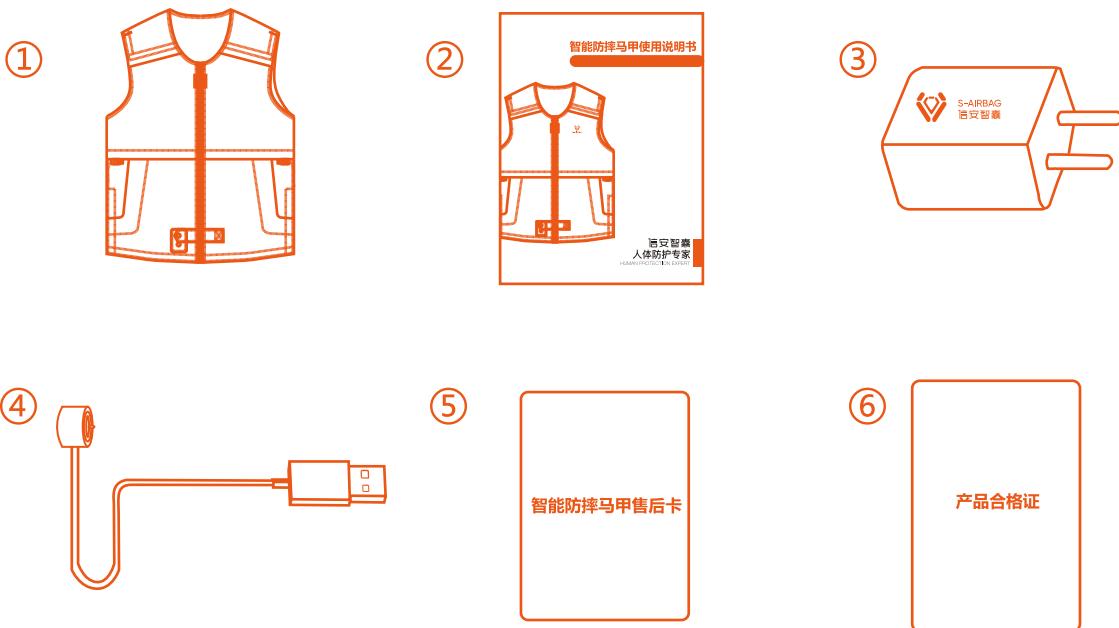

- ① 智能气囊服：提供保护并降低跌倒受伤的风险。
- ② 智能气囊服说明书：更好地了解如何使用智能防摔马甲。
- ③ USB 电源适配器：为智能气囊服的电池充电。
- ④ USB 磁性充电线：为智能气囊服的电池充电。
- ⑤ 保修卡：提供产品售后维修，退、换服务。
- ⑥ 产品合格证：产品参数及产品合格证明。

感谢您选择信安智囊的产品来保护您的日常生活。请仔细阅读本说明书，以便正确使用设备。不遵守说明可能会导致您的设备出现故障或降低其有效性。

智能气囊服必须挑选适合您的尺码，如有疑问请联系守护客服帮助，使用一下尺码表获取有关相应尺码的指示性信息：

S20尺码参考

SIZE	M	L	XL	2XL	3XL
衣长(cm)	69	71	72	73	74
胸围(cm)	85-110	95-120	105-130	110-140	120-150
肩宽(cm)	46	47	48	49	50
腰围(cm)	85-110	95-120	105-130	110-140	120-150
身高(cm)	155-170	165-175	170-180	175-185	180-195

•产品制造过程影响实际重量和尺寸。如有差异，请以实物为准。

如何测量？

- ① 衣长：从上到下测量智能防摔马甲。
- ② 胸围：围绕腋窝下方胸部最丰满的部分水平测量。
- ③ 肩宽：测量两个肩部之间的最大距离。
- ④ 腰围：围绕腹部水平测量。
- ⑤ 身高：直立时，从脚趾到头顶测量。

安全须知

S32尺码参考

S32男款



SIZE	M	L	XL	2XL	3XL
衣长(cm)	69	71	73	76	76
胸围(cm)	116	122	128	138	148
肩宽(cm)	42	44	46	48	50
腰围(cm)	78-120	83-126	88-132	98-142	108-152
身高(cm)	155-170	165-175	170-180	175-185	180-195

S32女款


SIZE	S	M	L	XL	2XL
衣长(cm)	63	66	68	70	73
胸围(cm)	104	114	120	126	136
肩宽(cm)	40	42	44	46	48
腰围(cm)	67-108	77-118	83-124	89-130	99-140
身高(cm)	140-160	145-165	155-170	160-175	165-190

•产品制造过程影响实际重量和尺寸。如有差异，请以实物为准。



如何穿戴智能气囊服

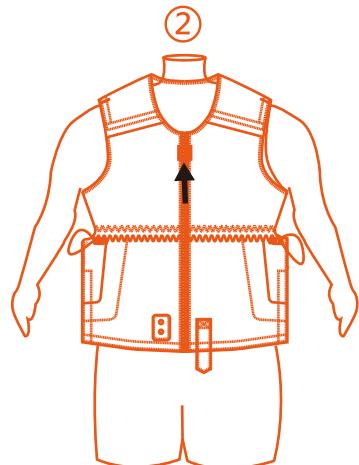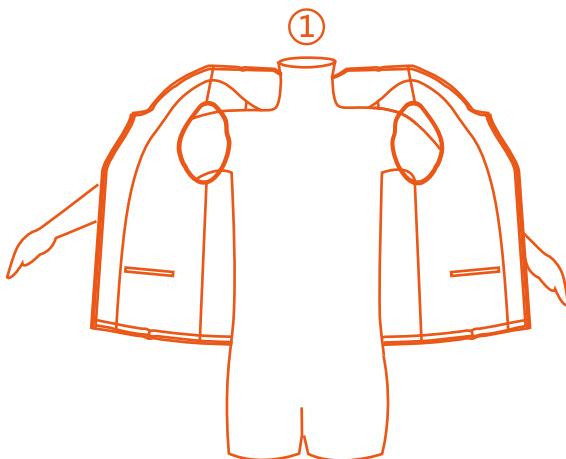

③ S20/S32女款调节绳

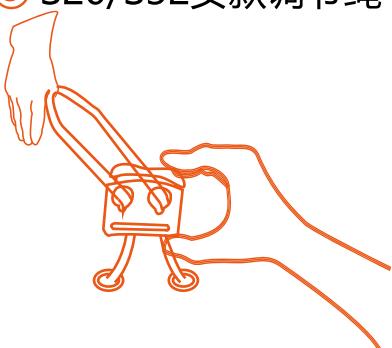

S32男款

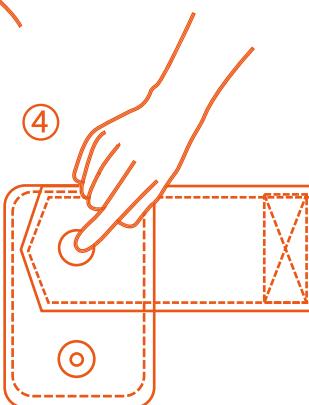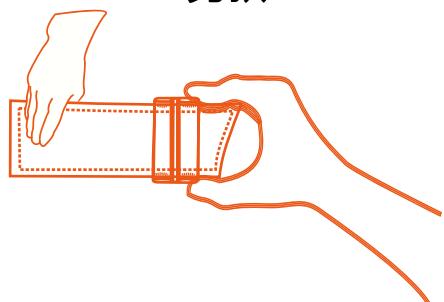


•请务必用调节绳将衣服调节到舒适合身，否则可能会影响传感器的判断。

- ① 第一步：穿上智能气囊服
- ② 第二步：拉上拉链
- ③ 第三步：用舒适调节绳将衣服调节到舒适合身
- ④ 第四步：扣上按扣智能防摔马甲正常使用。

如何激活智能气囊服

穿上智能气囊服后，确保已扣好连接按扣至关重要。当您扣好按扣后，会进行自动检测，所有灯会亮并伴有大约10秒检测音乐，当音乐停止时，表示您佩戴正确，系统正常工作。

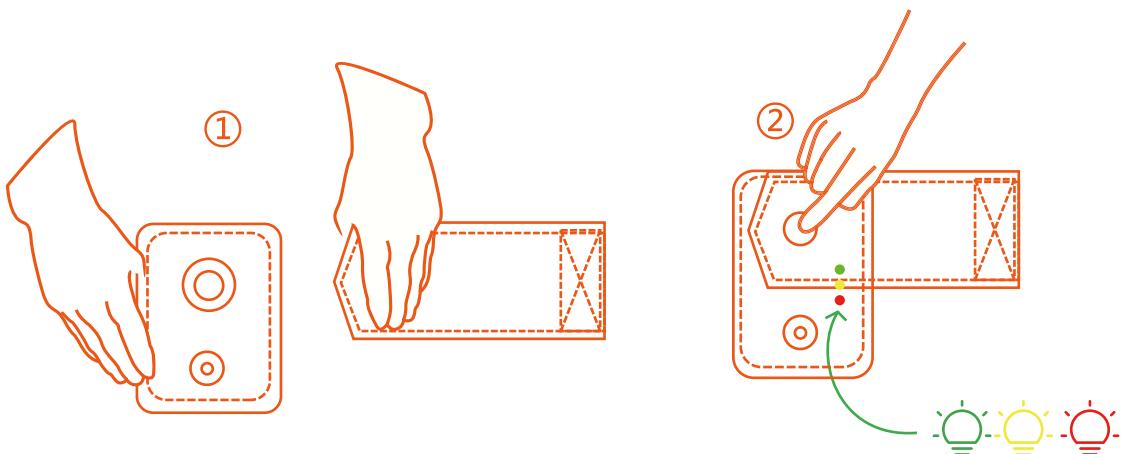

① 第一步：拿起按钮


② 第二步：扣上按扣



注意



- 如果您听不到自动检测音乐，请解开并重新扣上。如果仍然没有音乐，请联系售后客服。
- 确保将 穿在最外面，没有任何其他衣服覆盖它。

如何脱下并停止使用智能气囊服

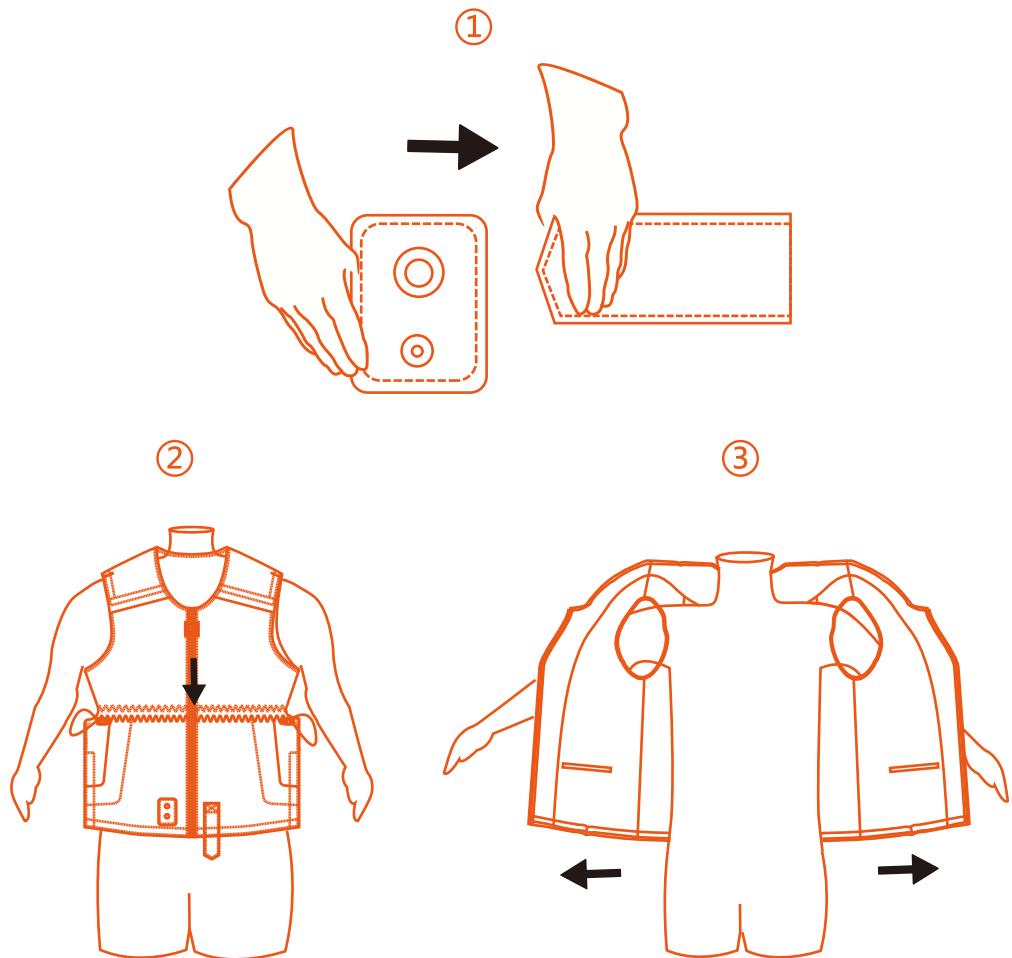

- ① 第一步：解开按扣
- ② 第二步：拉下拉链
- ③ 第三步：脱下智能气囊服

灯光信号和电池充电

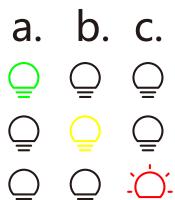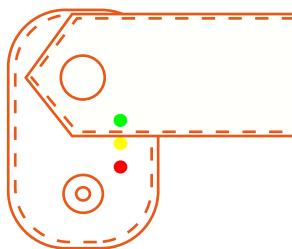


①电池状态:

a. 绿灯常亮: 电池电量超过 50%


b. 黄灯常亮: 电池电量在 10%-50% 之间

c. 闪烁红灯: 电池电量低于 10% (有音频快速提示音, 表示设备需要立即充电)

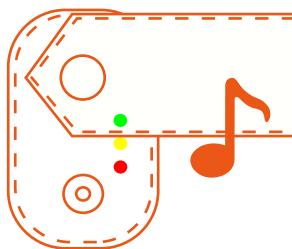

②故障通知:


d. 红、绿、黄三灯均闪烁并伴有滴滴声, 表示设备在使用前需要进行检查。

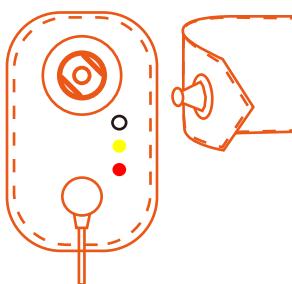

③充电电池:

e. 闪烁的红色或绿色或黄色灯表示设备正在充电 (确保在给电池充电时不要扣上按扣)

f. 常亮的红色、黄色和绿色指示灯表示设备已充满电。

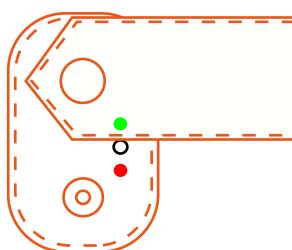


④睡眠模式:

g. 当用户躺下或平躺时, 系统将处于睡眠模式, 同时红灯和绿灯常亮。

⚠ 注意

- 确保在给电池充电时不要扣上按扣。
- 每次穿上智能气囊服, 扣上开关按扣, 系统开始检测过程, 红、绿、黄灯全亮。当检测过程完成后, 系统将自动工作, 电池状态灯常亮。
- 注意电池状态, 确保设备电量充足。
- 当出现故障提示且所有指示灯闪烁时, 请检查气瓶是否连接正确或联系售后客服。

穿戴者如何连接手机APP

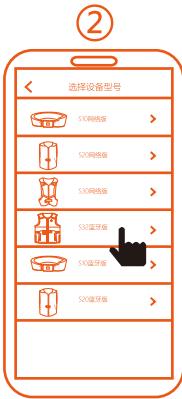

打开信安智囊APP，
点击连接设备

选择您的设备 点击选择穿戴者

1.勾选
2.点击搜索连接



选择S-Sxx-airbag
点击连接


1.填写穿戴者信息
2.点击保存

完成连接手机APP

⚠ 注意

- 请确保穿上衣服扣上扣子；
- 请确保手机打开蓝牙，手机能联网；
- 请确保手机距离防护产品5米范围内
- 设备扣上一直搜索不到设备请确定是否其他手机已经成为穿戴者角色，穿戴者只能有一个手机连接；
- 请注意蓝牙版设备请先绑定穿戴者，其他监护者请扫描穿戴者绑定成功后生成的二维码，（如果没保存，请在穿戴者手机打开APP-我的-我的设备-点击保存的设备-点击右上角二维码图标即可显示二维码）

监护人如何连接手机APP

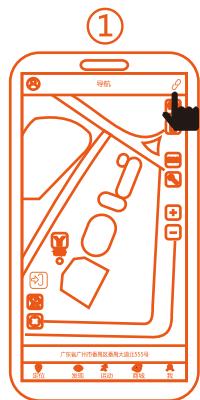

打开信安智囊APP，
点击连接设备



选择您的设备



点击选择监护人



扫描穿戴者的二维码




1. 填写穿戴者信息
2. 点击保存



完成连接



•请确保使用者已连接手机APP。

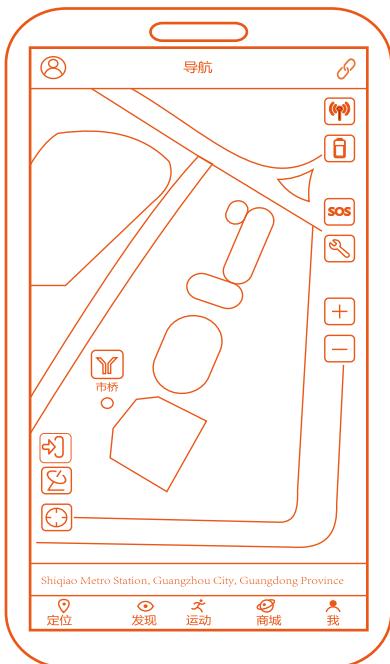

设备启动状态



卫星定位



位置定位



设备信号



设备电源



求救警报


SOS

设备触发警报后，关联的APP会收到设备警报，包括警报位置。相关家庭成员可以立即联系或采取救援措施（此功能需要允许该程序在手机后台持续运行）



故障报警

当设备出现故障时，该标志将显示为红色，并弹出故障信息显示到屏幕。当屏幕关闭时，您可以按故障按钮重新显示故障信息。

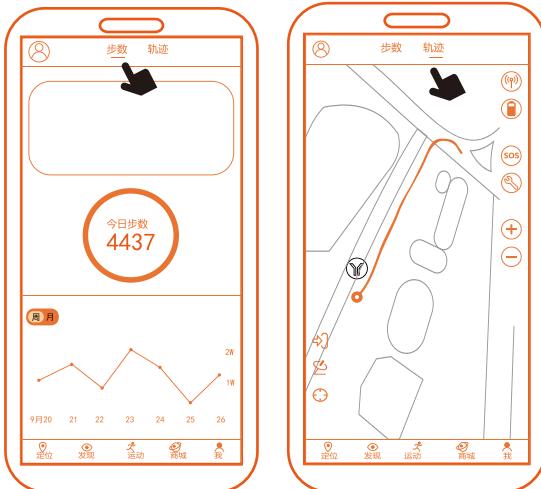

步数和轨迹

- ① 点击【运动】查看当天的步数记录；
- ② 点击【周/月】切换时长，可以查看7天的记录；
- ③ 点击【运动】 - 【轨迹】查看过往记录。




求救警报

当穿戴者跌倒时，智能气囊服将触发保护穿戴者。智能防摔马甲会出现带有蜂鸣器蜂鸣声的 SOS 警报，同时关联的 APP 会弹出警报通知页面。同时，将摔倒位置和最佳导航路线显示给看护者，以便立即救援。

触发安全气囊保护后

压缩气瓶用于在摔倒时触发安全气囊且仅供一次性使用。产品的安全气囊展开后，必须更换压缩气瓶，每次安全气囊展开后都需要折叠安全气囊。

您可以参考我们网站上的教程视频自行更换耗材，或联系售后客服寻求帮助。请务必更换压缩气瓶并正确折叠安全气囊。

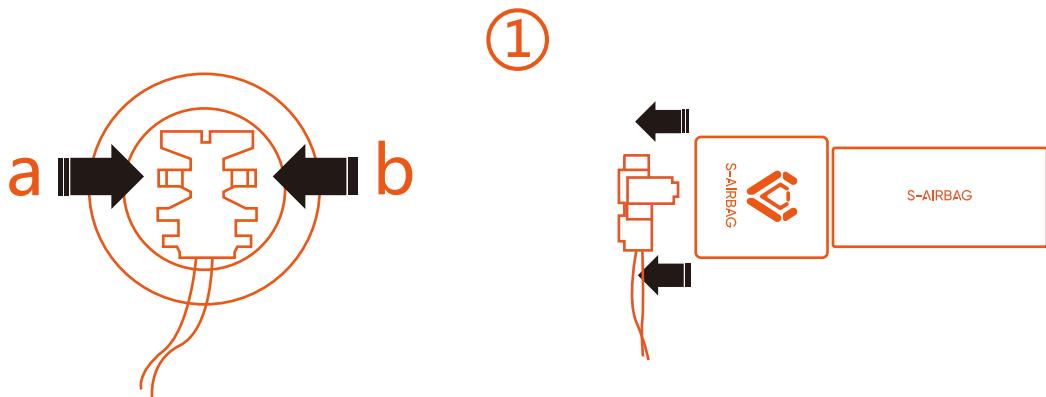


第一步：按下 a 和 b 的两端，同时拉出端子线。




第二步：逆时针拧出两个气瓶。

触发安全气囊保护后

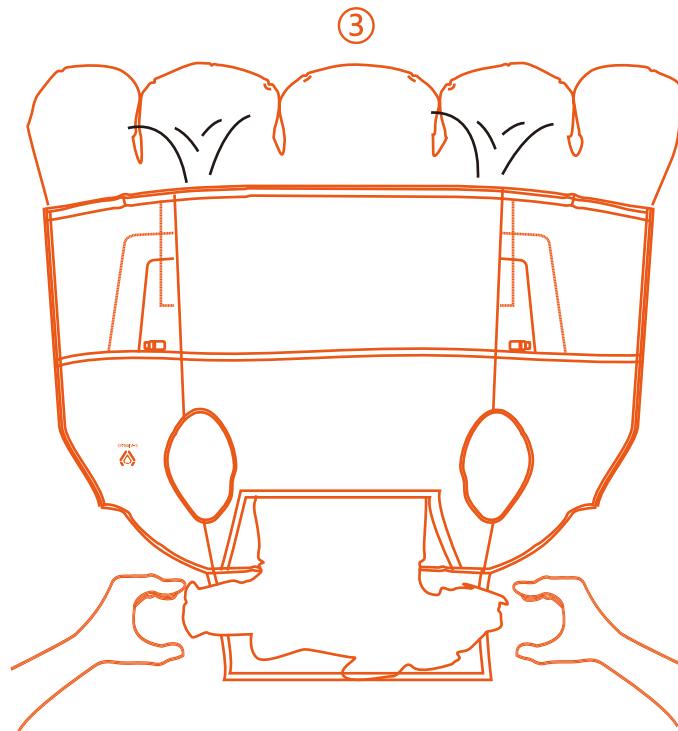


第三步：将背心压平，内侧朝下，外侧（标志侧）向上，将头部区域气囊中的气体挤出到臀部区域气囊。

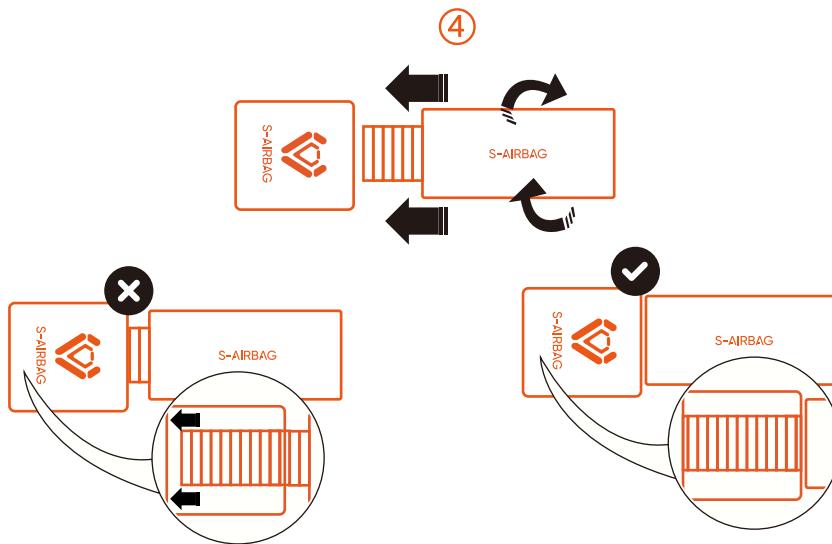


第四步：更换新的气瓶，顺时针拧入导气阀。

- 确保气瓶完全拧入导气阀。

触发安全气囊保护后

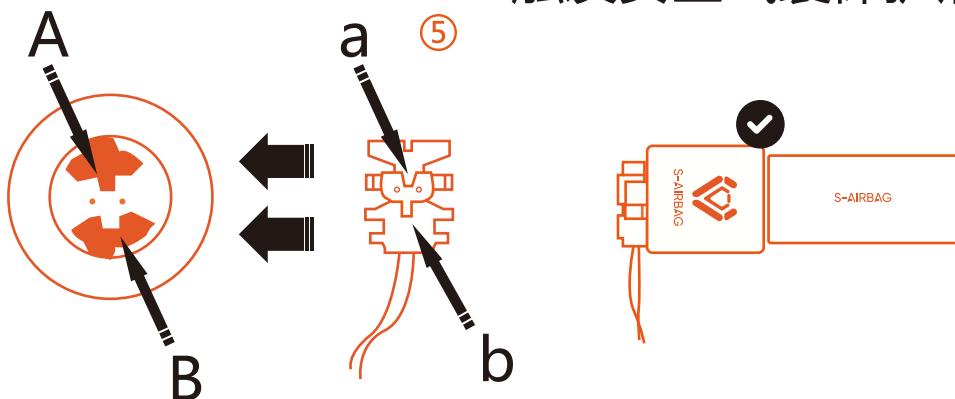

第五步：将A对a，B对b，插上端子线。

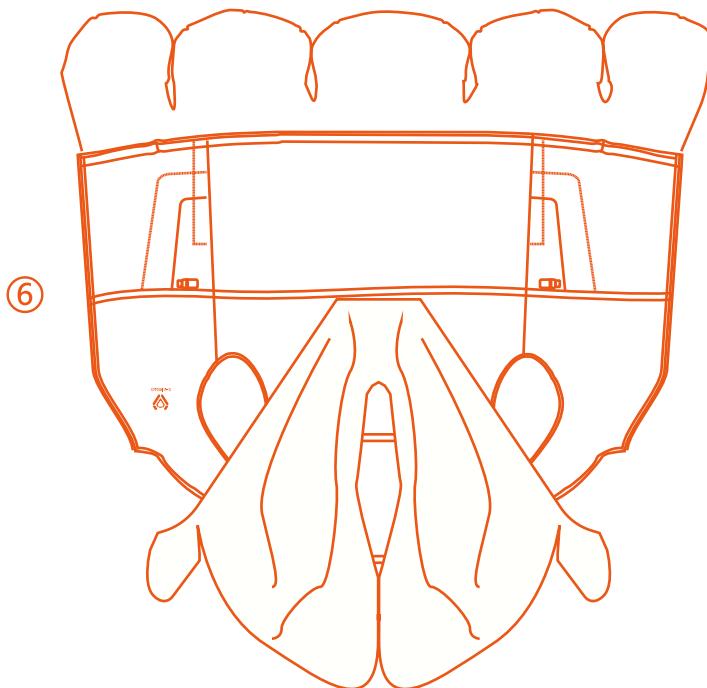


第六步：铺平智能防摔马甲，折叠一体式安全气囊。

压缩气瓶用于在摔倒时触发安全气囊且仅供一次性使用。产品的安全气囊展开后，必须更换压缩气瓶，每次安全气囊展开后都需要折叠安全气囊。

您可以参考我们网站上的教程视频自行更换耗材，或联系售后客服寻求帮助。请务必更换压缩气瓶并正确折叠安全气囊。

触发安全气囊保护后

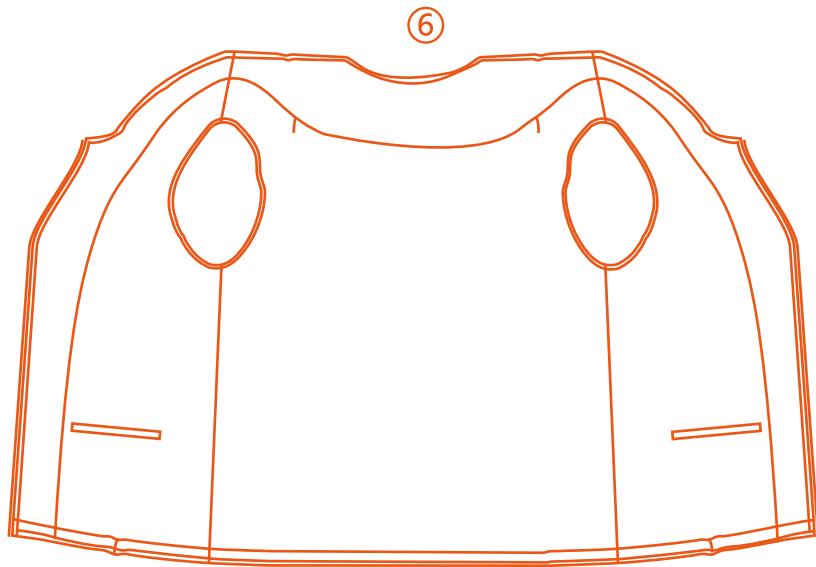

第六步：折叠后把一体式安全气囊放入衣服内并扣上织带扣
可继续使用

手机微信扫一扫观看教程视频：

了解更多请访问我们官方网站：www.s-airbag.com或联系售后客服。

- 重复使用设备：按照使用指导视频折叠安全气囊并更换气瓶。
- 卸下马甲：按照使用指导视频取下马甲，马甲可水洗。
- 蓝牙连接：按照蓝牙连接教程视频手机连接马甲蓝牙。
- 下载APP：手机打开**App Store**或**应用商城**-搜索-信安智囊，即可下载APP。

► 使用产品前的注意事项

- ① 每次使用前, 请检查您的智能气囊服是否完好 ; 如果发生损坏, 请联系我们的售后客服以获取更多帮助。

► 安全气囊展开后的注意事项

- ① 一旦安全气囊展开, 压缩气瓶必须更换为相同容量的新压缩气瓶。请注意, 每件智能气囊服包含两个气瓶 ; 如需要购买请联系我们的售后客服。

► 储存注意事项

- ① 请勿自行拆卸设备内部结构的任何部分 ;
② 该设备包含精密部件, 应小心处理 ; 放在儿童接触不到的地方 ;
③ 请仅使用我们原装的电源适配器, 并使设备远离火源或其他热源和尖锐物体 ;
④ 长时间不使用时, 请给电池充满电并取出电池 ;
⑤ 不使用设备时, 请保持开关按扣解开 ;
⑥ 除了智能气囊服的马甲外, 其他部分不能清洗, 因为里面装有电池。

► 其他

- ① 请勿在洗澡或睡觉时佩戴该设备 ;
② 为避免乘车时意外触发, 请解开开关按扣或脱下设备 ;
③ 请勿在智能气囊服上缝制 / 熨烫或粘贴任何物品, 因为它可能刺穿安全气囊并妨碍其正常工作 ;
④ 本产品有两年免费质保期, 两年内, 除气瓶外, 其它配件非人为损坏的, 都由我司免费更换, 免费质保过后也可以提供终身保修 ;
⑤ 本产品内置压缩气瓶有 15 年免检保证。

免责声明

尊敬的用户：

感谢您选择我司的产品，请在使用前详细阅读本产品说明书，以便本产品能为您提供更好的防护。

- ①请确保您按照本说明书中的方式使用本产品。
- ②本产品主要作用是缓冲跌倒时受到的冲击力，保护区域为头部、背部、臀部（S20款式增加脸部、前胸的保护），从而降低跌倒受伤的风险。
- ③本产品的触发条件是基于使用者在正常站立或行走状态下的跌倒情况。如遇其他情况，例如跌倒时握住扶手缓慢滑落、坐下或蹲下时，该产品可能会因跌倒速度达不到触发条件而无法触发气囊。
- ④对于严重的骨质疏松症患者，即使是轻微的碰撞也可能发生骨折。因此建议立即就医避免受伤的风险。
- ⑤本产品均在出厂前经过严格检测，并在检测合格后再出厂。鉴于使用场景多样化，并且伴有个体差异的原因，在使用本产品时并不能100%保证气囊触发，此情况下造成的伤害我司不承担责任。
- ⑥因使用使用场景多样化及使用者个体差异，气囊触发并不能100%保证身体其他部位不受伤害，此情况下造成的伤害我司不承担责任。
- ⑦请确保本产品穿戴在人体在外层，穿戴时请调整调节绳使至贴身状态。
- ⑧建议使用者在非穿戴期间采取适当的保护措施（包括但不限于浴室防滑和夜间起床保护）。
- ⑨在您乘坐交通工具时，因车辆颠簸可能导致本产品误触发，建议解开按扣。
- ⑩在您进行跑步、跳舞等剧烈运动时，请勿穿戴本产品。此外，不建议有心脏起搏器等植入于体内的电子治疗仪器、心脏病史患者或驼背大于35°的人群使用本产品。

所有未按本说明书规定的方法使用本品而导致的人身意外伤害或死亡，我司概不负责。本产品只能降低跌倒伤害的风险，但不能防止意外事故中的重伤或死亡。

了解更多



欲了解更多信息，请访问 www.s-airbag.com 或
关注官方微信公众号：信安智囊